



	Sustav za doziranje	Tehnika otiska	Krunica pojedinačnog zuba	Implantat (≤ 2 člana)	Inlay/onlay ispun (≤ 2 člana)	Mostovi (≤ 3 zuba)	Preporučeno maks. vrijeme rada (min:sek)	Intraoralno vrijeme stvrdnjavanja pri 37 °C (min:sek)
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Medium Body)		1 faza ili 1 korak	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Heavy Body)		1 korak	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick (Light Body)		1 korak	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00

Podaci za naručivanje



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body (69384), Uvodni komplet



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium/Light Body (69382), Uvodni komplet



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy/Light Body (69416), Uvodni komplet

Kataloški broj Podaci o proizvodu

NOVO Uvodni kompleti za 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick

- 69384** 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body (srednja gustoća)
1 temeljna pasta srednje gustoće – 300 ml, 1 katalizator srednje gustoće – 60 ml, 10 nastavaka za miješanje 3M™ Penta™ – crvenih, 1 elastomerna štrcaljka 3M™ Penta™, 1 polieterski adheziv za žlicu – 17 ml, uputstva za upotrebu
- 69382** 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium/Light Body (srednje/male gustoće)
1 temeljna pasta srednje gustoće – 300 ml, 1 katalizator srednje gustoće – 60 ml, 2 kartuše male gustoće – po 50 ml, 10 nastavaka za miješanje 3M™ Penta™ – crvenih, 5 intraoralnih štrcaljki 3M™ – ljubičastih, 5 nastavaka za miješanje 3M™ Garant™ – ljubičastih, 5 intraoralnih nastavaka 3M™ Garant™ – bijelih, 1 polieterski adheziv za žlicu – 17 ml, uputstva za upotrebu
- 69416** 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy/Light Body (velike/male gustoće)
1 temeljna pasta visoke gustoće – 300 ml, 1 katalizator visoke gustoće 60 ml, 2 kartuše 3M™ Impregum™ Super Quick male gustoće – po 50 ml, 10 nastavaka za miješanje 3M™ Penta™ – crvenih, 5 intraoralnih štrcaljki 3M™ – ljubičastih, 5 nastavaka za miješanje 3M™ Garant™ – ljubičastih, 5 intraoralnih nastavaka 3M™ Garant™ – bijelih, 1 polieterski adheziv za žlicu 3M™ – 17 ml, uputstva za upotrebu

Nadopune

- 69386** NOVO 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body (srednja gustoća)
1 temeljna pasta – 300 ml, 1 katalizator – 60 ml, uputstva za upotrebu
- 69410** 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body (velika gustoća)
1 temeljna pasta – po 300 ml, 1 katalizator – po 60 ml, uputstva za upotrebu
- 69380** 3M™ Impregum™ Super Quick Light Body (mala gustoća)
2 kartuše – po 50 ml, 5 intraoralnih štrcaljki 3M™ – ljubičastih, 5 nastavaka za miješanje 3M™ Garant™ – ljubičastih, uputstva za upotrebu
- Uređaji i pribor za miješanje**
- 77871** Uređaj za automatsko miješanje 3M™ Pentamix™ 3
- 77903** Uređaj za automatsko miješanje 3M™ Pentamix™ Lite – 230 V 50 Hz INT uključ. 1 kartuša 3M™ Penta™
- 69387** 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body, kartuša
- 69401** 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body, kartuša
- 77944** 3M™ Penta™ kartuša za uređaj 3M™ Pentamix™ Lite
- 71507** Intraoralne štrcaljke 3M™ – ljubičaste, 20 kom.
- 77580** Garant dispencer 1:1/2:1
- 30600** Polieterski adheziv za žlicu – 17 ml
- 77949** Nastavci za miješanje 3M™ Penta™ – crveni, 50 kom.
- 77919** Nastavci za miješanje 3M™ Penta™ – crveni, 30 kom.
- 71454** Nastavci za miješanje 3M™ Garant™ – ljubičasti, 50 kom.
- 71461** Intraoralni nastavci 3M™ Garant™ – bijeli, 50 kom.

3M.com/Dental



3M (East) AG Podružnica
Republika Hrvatska
Avenija Većeslava Holjevca 40
Zagreb

3M Garant, Impregum, Penta i Pentamix zaštitni su znakovi kompanije 3M ili 3M Deutschland GmbH. Upotrebljavaju se pod licencom u Kanadi. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su drugih kompanija. © 3M 2018. Sva prava zadržana.


3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Impregum™ Super Quick
Polieterski otisni materijal

Zabilježiti
svaki detalj u 2
minute?
Da, moguće je.

Od sada
dostupan u
izvedbi visoke
gustoće!

Najbolji za
tehniku u jednom
koraku

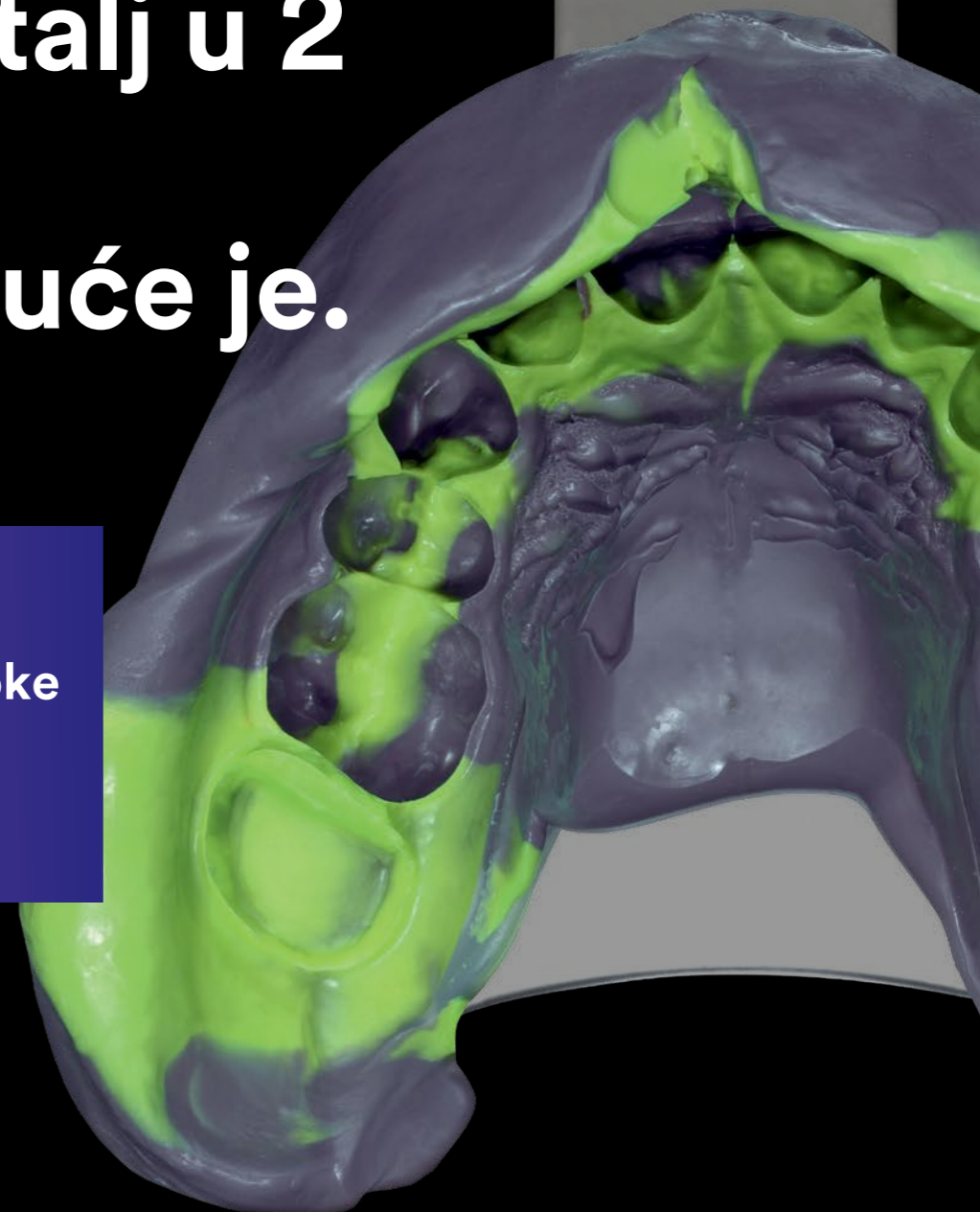

Najbrži put do preciznosti u manje složenim slučajevima 3M™ Impregum™ Super Quick.

Polieterski otisni materijal Impregum poznat je kao pouzdano rješenje za složene situacije i implantate. Zar onda ne bi bilo sjajno da možete dobiti istu vrhunsku točnost otiska i reprodukciju detalja i u manje složenim slučajevima? Da bismo zadovoljili i najviše zahtjeve, a istodobno ne ugrožavajući produktivnost, stvorili smo novi polieterski otisni materijal Impregum Super Quick.

Nova formula materijala Impregum Super Quick objedinjuje odlične rezultate i pouzdanost polietera s brzinom vinil-polisiloksana (VPS). Duboke margine i vlažno okruženje više vas neće ometati.



Brže stvrdnjavanje.

Tako brzo, a tako dobro: uz samo dvominutno stvrdnjavanje, novi materijal Impregum Super Quick omogućuje brže otiske u manje složenim slučajevima poput pojedinačnih krunica, inlay i onlay ispuna te manjih zubnih mostova do 3 zuba.

100% polieteter. Pouzdana preciznost.

Materijal Impregum Super Quick, kao i svi polieteri, daju odlične rezultate kod povećane vlažnosti i ima izvrsno svojstvo tečenja. Oba svojstva dovode do bolje preciznosti i reprodukcije detalja, čime se postižu nadomjesci visoke preciznosti.

Od posebne je važnosti da dobijete dovoljno dugo vremena manipulacije materijalom za otiskivanje. Budući da je riječ o polieteteru, s materijalom Impregum Super Quick dobivate punih 45 sekundi manipulacije. Tako možete izbjeći netočnosti povezane s kratkim vremenom stvrdnjavanja materijala kao kod upotrebe VPS.

Neka se i vaši pacijenti osjećaju udobno.

Poboljšan svjež okus mentola i kratko vrijeme stvrdnjavanja u ustima čine otiskivanje ugodnijim pacijentu.

Polieteter u kombinaciji s CAD/CAM tijekom rada.


Materijal Impregum Super Quick može se snimiti skenerima najnovije generacije i tako omogućiti učinkovitiju suradnju s laboratorijem. Najbrži put do preciznosti u manje složenim slučajevima 3M™ Impregum™ Super Quick.



Učinkovita i brza kontrola vlažnosti i retrakcije gingivalnog tkiva uz astringentnu retrakcijsku pastu 3M™.



Praktična, vrlo precizna primjena polieterskoga otisnog materijala 3M™ Impregum™ Super Quick Light Body s pomoću ljubičaste intraoralne štrcaljke 3M™.

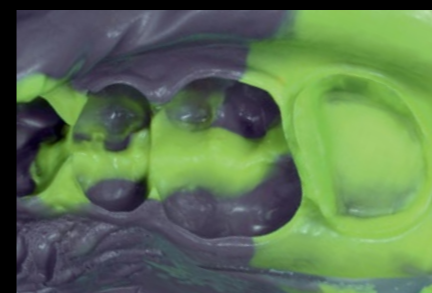

Precizni detalji bez mjehurića u kombinaciji s kontrastom boja omogućuju izvrsno raspoznavanje detalja

Vrlo precizan otisak u 1 koraku izrađen polieterskim otisnim materijalom 3M™ Impregum™ Super Quick (velike i male gustoće) žlicom za otiske 3M™ za jednokratnu uporabu.

VISOKO ZADOVOLJSTVO

Klinički je procijenjena vrlo visoka stopa zadovoljstva od gotovo **95%** s obzirom na **preciznost** otisaka izrađenih od materijala 3M™ Impregum™ Super Quick i **konačnih zubnih nadomjestaka**.



Izvor: terenska procjena kompanije 3M na 447 sudionika iz Europe i SAD-a, 2017.

3M™ Impregum™ Super Quick

- Prvi superbrzi polieteter s vremenom manipulacije od 45 sekundi i brzim stvrdnjavanjem u 2 minute
- Dostupan u izvedbi velike, srednje i male gustoće
- Za jednofaznu i tehniku otiskivanja u jednom koraku
- Savršen za otiske pojedinačnih krunica nadomjestaka, inlay i onlay ispuna te manjih zubnih mostova do 3 člana

